


Die optimale Sitzposition

- 1 Die Oberkante der Kopfstütze liegt in Höhe des Scheitels des Passagiers.
- 2 Der Abstand zwischen Kopf und Kopfstütze ist möglichst gering.
- 3 Die Oberkante der Rückenlehne des FutureSafe 2.0 liegt in Höhe des Schulterbereichs.
- 4 Die Rückenlehne des FutureSafe 2.0 liegt an der Rückenlehne des Rollstuhls an.

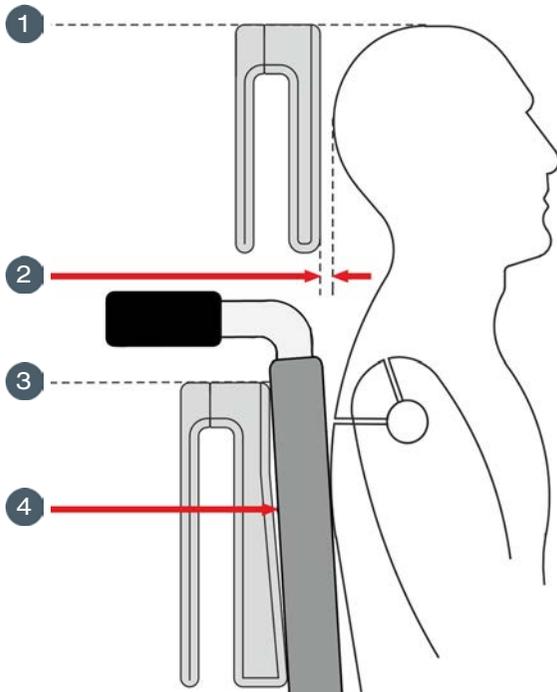

Hinweis:

Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sind nicht immer in der Lage, die oben dargestellte Haltung einzunehmen. Versuchen Sie immer, die Bedürfnisse des Passagiers an den Komfort zu berücksichtigen und trotzdem ein Maximum an Sicherheit zu erreichen.

Die Dicke von Kopfstütze und Rückenlehne können durch Auflagepolster (optionale Zusatzausstattung) verändert werden.

Diese Kurzbedienungsanleitung ersetzt keinesfalls die reguläre Bedienungsanleitung! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig die Bedienungsanleitung durch!

Technische Änderungen vorbehalten.



AMF-Bruns GmbH & Co. KG
 Hauptstraße | 26689 Apen | Germany
 Telefon +49 (0) 4489 / 72 72 22
 Telefax +49 (0) 4489 / 62 45
 service.hubmatik@amf-bruns.de
 www.amf-bruns.de

Art.-Nr.: 10025359 Rev. 1 | 01/2023

Kurzbedienungsanleitung

FUTURESAFE 2.0

Kopf- und Rückenstütze für Rollstuhlfahrer



Diese Kurzbedienungsanleitung griffbereit im Fahrzeug mitführen!

Vor Gebrauch auch die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen!



www.amf-bruns.de

Schwenkarm drehen

1. Ziehen Sie zum Entriegeln waagrecht an der Bedienschleife eines Schwenkarms.



2. Drehen Sie den Schwenkarm ein wenig in die gewünschte Richtung.
3. Lassen Sie die Bedienschleife los.
4. Drehen Sie den Schwenkarm weiter in die gewünschte Richtung, bis die Arretierung in der nächsten Position hörbar einrastet.
5. Stellen Sie durch kräftiges Ruckeln an dem Schwenkarm sicher, dass die Arretierung eingerastet ist.
6. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Schwenkarm noch weiter zu drehen.

⚠️ Warnung! Ein nicht arretierter Schwenkarm kann den Passagier im Falle eines Unfalls nicht unterstützen und er kann während der Fahrt unerwartet herumschwenken. Drehen Sie einen Schwenkarm immer bis zum hörbaren Einrasten und kontrollieren Sie das Einrasten durch kräftiges Ruckeln. Arretieren Sie die Schwenkarme auch, wenn kein Passagier damit gesichert wird.

Kopfstütze und Rückenlehne höher stellen

1. Ziehen Sie die Kopfstütze oder die Rückenlehne bis in die gewünschte Position nach oben.
2. Drücken Sie die Kopfstütze oder die Rückenlehne wieder etwas nach unten, bis sie beidseitig spürbar einrastet.

Kopfstütze und Rückenlehne niedriger stellen

1. Drücken Sie den Höhen-Entriegelungsknopf der Kopfstütze oder der Rückenlehne.



2. Drücken Sie die Kopfstütze oder die Rückenlehne bei gedrücktem Höhen-Entriegelungsknopf bis in die gewünschte Position nach unten.
3. Lassen Sie den Höhen-Entriegelungsknopf los.
4. Drücken Sie die Kopfstütze oder die Rückenlehne etwas weiter nach unten, bis sie beidseitig spürbar einrastet.

Schwenkarm ausziehen und einschieben

1. Drücken Sie den Seiten-Entriegelungsknopf nach unten.



2. Schieben Sie den äußeren Teil des Schwenkarms bei gedrücktem Seiten-Entriegelungsknopf in die gewünschte Position.
3. Lassen Sie den Entriegelungsknopf los.
4. Schieben Sie den äußeren Teil des Schwenkarms noch etwas weiter herein oder heraus, bis die Arretierung deutlich hörbar einrastet.
5. Stellen Sie durch kräftiges Ruckeln in Verschieberichtung sicher, dass die Arretierung eingerastet ist.

FutureSafe 2.0 mit Seitenhalterung nach vorn oder hinten verstellen

1. Drehen Sie die roten Verschlusshebel in die senkrechte Position (grüne Pfeile).
2. Lösen Sie die schwarzen Sternschrauben (gelbe Pfeile).



3. Schieben Sie den FutureSafe 2.0 nach vorn oder hinten in die gewünschte Position.
4. Stellen Sie die roten Verschlusshebel zurück in die waagerechte Position.
5. Schieben Sie den FutureSafe 2.0 etwas vor oder zurück, bis beide Verschlusshebel deutlich hörbar einrasten.
6. Drehen Sie die schwarzen Sternschrauben wieder fest.

⚠️ Warnung! Der Rollstuhl muss in Fahrtrichtung stehen. Befestigen Sie den Rollstuhl immer mit den dafür vorgesehenen Rückhaltesystemen und nur an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten. Sichern Sie den Passagier mit dem dafür vorgesehenen Beckengurt und dem Schultergurt des FutureSafe 2.0. Dabei muss der Beckengurt am Becken und nicht am Bauch des Passagiers anliegen. Die Gurte dürfen nicht über die Armlehnen des Rollstuhls geführt werden. Stecken Sie das Gurtschloss des Schultergurtes an der dafür vorgesehenen Gurtlasche an dem Rückhaltesystem des Rollstuhls oder am Beckengurt ein.

Die Rückhaltesysteme für den Rollstuhl und den Passagier müssen nach den vor Ort geltenden Normen ausgeführt sein. Wenden Sie sich an die AMF-Bruns GmbH, wenn Zweifel an der Eignung der Rückhaltesysteme in Ihrem Fahrzeug bestehen.